




Så använder du hjärtstartaren Philips HeartStart FRx

Vid misstänkt hjärtstopp: Be någon att larma 112 och hämta hjärtstartaren. Starta HLR omedelbart.


- 1 **Starta hjärtstartaren** genom att trycka på den gröna på/av-knappen. Följ hjärtstartarens röstinstruktioner, de kommer att vägleda dig steg för steg.

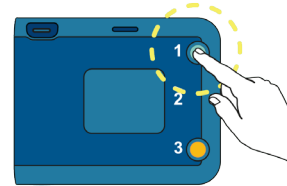



- 2 **Ta bort alla kläderna** från bröstkorgen. Klipp om nödvändigt, sax finns i väskan. Torka fuktig hud och raka vid behov.

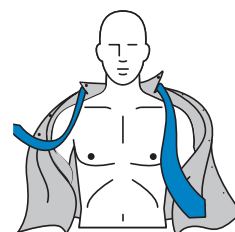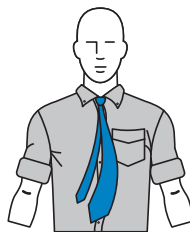


- 3 **Öppna det grå plastfodralet** där elektroderna förvaras och **titta noga på bilderna**. Elektrod fodralet förvaras till vänster i den röda väskan.

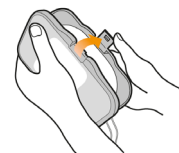


- 4 **Dra bort en elektrod i taget och placera elektroden** på bröstkorgen exakt som bilden visar på respektive elektrod. Tryck fast elektroderna ordentligt mot bröstkorgen.

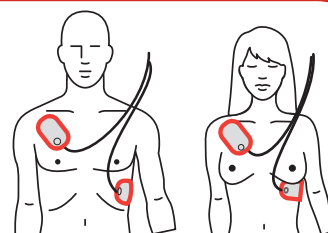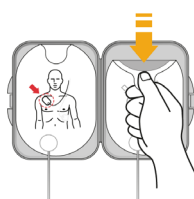

- 5 **Rör inte personen. Hjärtstartaren analyserar** nu hjärtrytmen. Om hjärtstartaren hittar en behandlingsbar rytm kommer den att uppmana dig att trycka på defibrilleringsknappen.

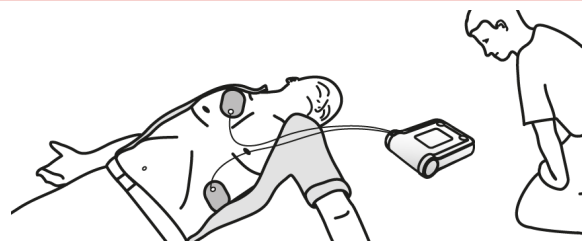

- 6 Defibrillering rekommenderas. **Tryck på den orangea blinkande knappen** vid uppmaning. Se till att ingen är i fysisk kontakt med personen.

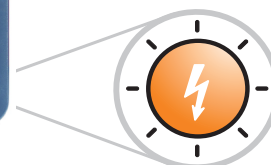

- 7 **Starta hjärt-lungräddning**. Vill du ha hjälp med hur du gör, tryck på den blå blinkande knappen. HLR ska pågå med så få avbrott som möjligt. Fortsätt att följa hjärtstartarens instruktioner.

